

FIȘĂ TEHNICĂ



Denumire produs: CENTURĂ LOMBO-ABDOMINALĂ DCT

Material: bandă elastică - materialul din care este executată nu conține substanțe dăunătoare sănătății și igienei utilizatorului. Nu prezintă îngrosări ale materialului în zonele de îmbinare ale materialelor.

Dimensiuni:

- centura abdominală se livrează în mai multe mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Domeniu de utilizare:

Activitatea zilnică din domeniul industrial și comercial predispune la suprasolicitări ale unor părți ale corpului uman, mai ales în timpul căratului, ridicărilor, statului prelungit în picioare, starea prelungită în condiții de tensionare. În asemenea condiții se suprasolicită coloana vertebrală, zona lombară și spatele ceea ce conduce la afecțiuni ale tendoanelor și oaselor.

Utilizare:

- se utilizează în zone de lucru cu temperaturi cuprinse între -25°C și +40°C, umiditate a aerului relativă de 80%;
- puneți bretelele și poziționați centura confortabil în jurul taliei, șoldurilor și a cutiei toracice;
- trageți capetele laterale unul peste celălalt până la cuplarea confortabilă;
- întindeți barețele elastice exterioare înainte și fixați prin presare pentru a fixa poziția centurii;
- ajustați tensiunea centurii și a bretelelor pentru a asigura purtarea confortabilă.

Mențiuni importante:

- folosirea acestei centuri nu modifică cerința menținerii condiției fizice la nivel ridicat;
- nu previne leziunile și nu trebuie utilizată pentru a preveni incapacitățile fizice;
- această centură trebuie folosită numai după efectuarea instructajului privind tehnicile corecte de ridicare;
- este recomandat ca acest instructaj să includă și consultarea medicului, în special dacă ați acuzat dureri sau disconfort în timpul ridicării.